

Silflex® / Siltape®

Miękki, silikonowy opatrunek siatkowy oraz rozwijany przyklep silikonowy



Opis produktu


Silflex jest opatrunkiem wykonanym z siatki poliestrowej powlekaną miękkim silikonem Silfix®. Unikalna budowa opatrunku sprawia, że przylega on do zdrowej skóry, a nie do rany, dzięki czemu zmiana opatrunku jest całkowicie bezbolesna i bezurazowa (*). Opatrunek umożliwia przenikanie wydzieliny z rany.

Siltape jest silikonowym przyklepcem rozwijanym z rolki, który można docinać lub urywać w dowolnych fragmentach. Zdejmowanie przyklepca Siltape jest całkowicie bezbolesne i atraumatyczne dla pacjenta, w przeciwieństwie do tradycyjnych materiałów przyklepanych nie pokrytych warstwą silikonową.

Sposób użycia

W przypadku Silflex należy zdjąć przezroczyste przekładki znajdujące się po obu stronach opatrunku i nałożyć go bezpośrednio na ranę. Opatrunek Silflex może zachodzić na krawędzie rany. Opatrunek można dodatkowo przykryć dowolnym opatrunkiem wtórnym, zapewniającym warstwę chłonną lub ochronną. Polecamy zarówno opatrunek Eclipse Adherent (s. 11) lub też Advazorb Border (s. 10) w zależności od poziomu wysięku.

Siltape jest zwiniętą taśmą, którą rozwija się z rolki i dzięki odpowiedniej perforacji umieszczonej co 5 cm wzdłuż całej długości jest możliwe urwanie małych jego odcinków. Takie rozwiązanie umożliwia łatwe zastosowanie przyklepca w każdych warunkach bez konieczności użycia nożyczek.

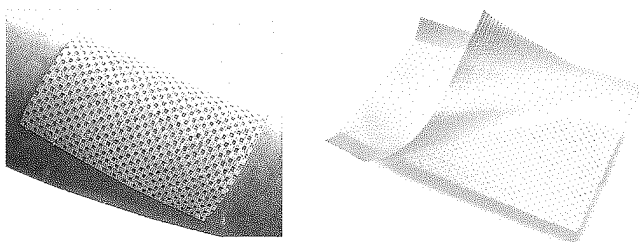

Opatrunek Siltex

Cechy

- ✓ Przylega tylko do skóry suchej, nie do wilgotnej rany
- ✓ Delikatny, miękki silikon umożliwia bezbolesną zmianę opatrunku
- ✓ Pokryty hydrofobową warstwą miękkiego silikonu Silfix
- ✓ Miękki i przylegający

Wskazania

- ✓ Uszkodzenia i otarcia skóry
- ✓ Rany chirurgiczne
- ✓ Oparzenia drugiego stopnia
- ✓ Powierzchnowe rany m.in. w przebiegu *Epidermolysis Bullosa*.



*S. Thomas. World Wide Wounds, Jan 2003

Produkt	Rozmiar	Kod produktu	Ilość sztuk w opakowaniu
Silflex	5 cm x 7 cm	CR3922	10
Silflex	8 cm x 10 cm	CR3923	10
Silflex	12 cm x 15 cm	CR3924	10
Silflex	20 cm x 30 cm	CR3925	10
Siltape	2 cm x 3 m	CR3938	1
Siltape	4 cm x 1,5 m	CR3939	1