

## NeoShades<sup>®</sup> – z opaską mocującą

### Okularki ochronne do fototerapii z unikalnym wzorem okularów słonecznych



#### Właściwości i zalety

- Nowy, cieńszy, bardzo miękki materiał zapewnia pełen komfort oraz bezpieczeństwo
- Większe blokowanie światła UV aż do 99.999%
- Zapewnia większe bezpieczeństwo oraz redukuje czas pielęgnacji pacjenta
- Mocowanie za pomocą bezpiecznej opaski wykonanej z NeoFoam zapobiegającej zsuwaniu się.

Nr katalogowy	Rozmiar	Ilość w
N727	Mikro / Micro	50 szt. / op.
N728	Mały / Small	50 szt. / op.
N729	Duży / Large	50 szt. / op.

Specjalny kształt zapewnia idealne dopasowanie w zależności od o różnych rozmiarów głowy


Deklaracja zgodności jest dostępna na stronie internetowej Neotech:

[www.neotechproducts.com](http://www.neotechproducts.com).

Data ważności produktu jest wydrukowana na opakowaniu bezpośrednim, jak również na pudełku do wydawania produktu



## NeoShades® z opaską mocującą – wskazówki stosowania

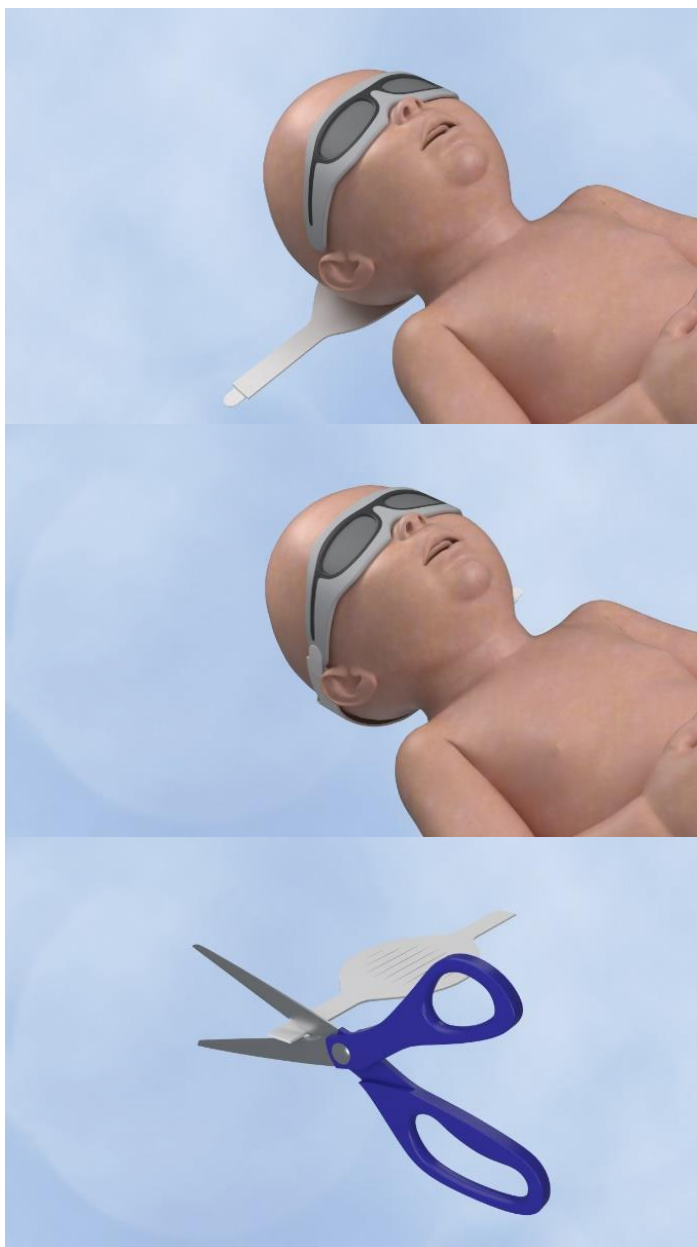

### Krok 1

Wybierz rozmiar odpowiedni dla pacjenta.

### Krok 2

Umieść opaskę mocującą z tyłu, za głową dziecka, pianką antypoślizgową od strony włosów.

### Krok 3

Ostoń oczy dziecka okularkami NeoShade.

### Krok 4

Delikatnie przymocuj zapięcie rzepowe na końcu opaski mocującej do okularków NeoShades.

### Krok 5

Powtórz tę czynność z drugiej strony.

**Ważne:** Opaski można przycinać dla lepszego dopasowania.

**Uwaga:** Pamiętaj, że NeoShades należy stosować pod ścisłą kontrolą wykwalifikowanego personelu medycznego.

Nr katalogowy	Długość ochronników	Obwód głowy
N727	108 mm	Poniżej 28 cm
N728	127 mm	28-34 cm
N729	178 mm	Powyżej 33 cm

Wyżej wymienione rozmiary, są rozmiarami orientacyjnymi, zę względu na możliwość repozycjonowania rzepów po obu stronach okularków. w zakresie +/- 3,5 cm z każdej strony.

U.S. Patent #D410,021; #8,070,288;  
Additional Patents Pending

