

## Jednorazowy bezpośredni łącznik do rurki tracheostomijnej

### Model/Dane techniczne:

Typ	Model		
Tracheostomia wysokoprzepływowa	RVQ001G □	RVQ001C □	RVQ001R □

**Przeznaczenie:** Bezpośrednie dostarczanie tlenu ze źródła tlenu do pacjenta lub dostarczanie po nawilżeniu.

**Zastosowanie:** Stosowanie w połączeniu z urządzeniami do terapii oddechowej i terapii wysokoprzepływowej w szpitalu lub w domu.

**Komponenty:** Produkt składa się ze złącza źródła powietrza, rurki, złącza wylotu, osłony ssącej i smyczy.


### Właściwości produktu:

1. Długość produktu: 350 mm ± 10%.
2. Złącze źródła powietrza kompatybilne ze złączkami stożkowymi 22 mm (ISO 5356-1), złącze wylotu kompatybilne ze złączkami stożkowymi 15 mm (ISO 5356-1).
3. Siła połączenia: Napięcie statyczne 15 N trwające przez 15 s, niepowodujące odłączenia w obszarze pomiędzy każdą częścią.
4. Materiały spełniają wymagania dyrektywy RoHS 2011/65/UE, ISO 10993-1, ISO 10993-5, ISO 10993-10.

**Środowisko stosowania:** Temperatura: +5°C ~ +40°C; wilgotność względna: 15% ~ 90%, bez kondensacji.

### Instrukcje:

1. Wybrać odpowiedni rozmiar i natężenie przepływu pod kierunkiem lekarza.
2. Podłączyć złącze rurki tracheostomijnej układu oddechowego do złącza wylotu w jednorazowym bezpośrednim łączniku rurki tracheostomijnej i upewnić się, że połączenie jest mocne.
3. Podłączyć złącze końcowe rurki oddechowej od strony pacjenta do złącza źródła powietrza w jednorazowym bezpośrednim łączniku rurki tracheostomijnej i upewnić się, że połączenie jest mocne.
4. Po użyciu usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami, aby uniknąć zanieczyszczenia środowiska.

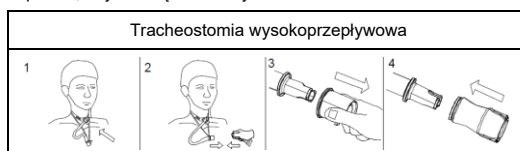

### ⚠ Ostrzeżenia:

1. Nie używać, jeżeli opakowanie jest uszkodzone. Produkt przeznaczony do jednorazowego użytku.
2. Nie zginać, nie skręcać, nie zginać ani nie rozciągać rurki.
3. Pacjenci z uszkodzoną skórą szyi nie powinni nosić smyczy na szyi.
4. Produkt służy jako dodatek do urządzenia i jest zgodny z wymaganiami w zakresie przeciwwskazań mającymi zastosowanie do urządzenia.
5. Regularnie sprawdzać pod kątem obecności kondensatu. W razie potrzeby opróżnić, aby uniknąć przedostania się kondensatu do dróg oddechowych pacjenta.
6. Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie produktu spowodowane niewłaściwym transportem, warunkami przechowywania lub postępowaniem w sposób niezgodny z instrukcją obsługi.
7. Nie używać w pobliżu otwartego ognia, aby uniknąć pożaru.
8. Wyrób przeznaczony do jednorazowego użytku przez pacjenta. Maksymalny czas użytkowania wynosi 14 dni. Ponowne użycie lub używanie przez okres dłuższy niż podany może spowodować zakażenie.

### Przeciwwskazania:

1. Nie stosować w przypadku braku samodzielnego oddychania lub słabego samodzielnego oddychania i śpiączki.
2. Nie stosować w przypadku uczulenia na materiały użyte w produkcie.

### Środowisko przechowywania:

Temperatura: -20°C ~ +55°C; wilgotność względna: 15% ~ 90%. Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Unikać bezpośredniego działania promieni słonecznych.

**Termin ważności:** Przechowywać w podanych warunkach. Termin ważności: 2 lata.

**Data produkcji/Data ważności:** Zob. opakowanie produktu.



Producent: Beijing Rongrui – Century Science & Technology Co. Ltd