



## GAZIKI DO DEZYNFEKCJI SKÓRY

### Med Hygienic

#### **OPIS PRODUKTU:**

Specjalistyczne gaziki do dezynfekcji skóry, nasączone alkoholem izopropylowym i etylowym. Korzystanie z gazików eliminuje używanie sprayu. Gaziki są gotowe do natychmiastowego użycia i łatwe w stosowaniu. Są policzalne, co pozwala w pełni kontrolować ich zużycie. Wykonane są z miękkiego, przyjemnego dla skóry materiału. Wyrób medyczny klasa I.

#### **ZALECANE DO DEZYNFEKCJI I CZYSZCZENIA SKÓRY:**

- przed pobraniem krwi, wkłuciem do naczyń, zastrzykami, iniekcjami,
- przed szczepieniem,
- przy samokontroli u diabetyków,
- przed zabiegami kosmetyczno-medycznymi

#### **CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU:**

- skład proporcjonalnie: 36,8% izopropanol, 47,3% etanol;
- gaziki wykonane z wysokogatunkowej włókniny, mieszanka celulozy, poliestru i wiskozy, gramatura 70 g/m<sup>2</sup>

#### **SPEKTRUM DZIAŁANIA:**

bakterie, grzyby w czasie do 15 sekund,  
wirusy w tym Polio i Adeno w czasie do 1 minuty;

#### **ASORTYMENT GAZIKÓW:**

Rozmiar	Symbol	Ilość sztuk w opakowaniu	Forma pakowania	Ilość warstw włókniny	Złożenie włókniny	Nasączenie alkoholem w g	Nr katalogowy
12 x 12,5 cm	L	100	karton	9 warstw	czterokrotnie	2,5 - 3	IPE 639

#### **Instrukcja Użycia**

Rozerwać saszetkę w miejscu nacięcia. Dwoma palcami wyjąć gazik, przetrzeć skórę dwukrotnie ruchem posuwistym, raz w górę raz w dół. Odczekać czas wymagany dla osiągnięcia pożądanego spektrum działania. Wykonać zabieg.

Unikać kontaktu z oczami. Przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci. Nie używać po terminie ważności umieszczonym na opakowaniu.



Euro Trade Technology Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Siemiradzkiego 19, 64-920 Piła;  
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda,

IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000164052;

REGON 572107999; NIP PL 764-23-99-823;

kapitał zakładowy w wysokości 50 000,00 zł;

Zarząd Spółki: Nils Erik Rickard Alm.

