

Kaniula dotętnicza BD

pl

Instrukcja użytkowania

Wytyczne ogólne

- Urządzenie przeznaczone wyłącznie do użytku z:
 - zestawami do monitorowania ciśnienia tętniczego,
 - urządzeniami do seryjnych pomiarów gazometrii krwi tętniczej.
- W celu prawidłowego użytkowania lekarz musi znać zasady stosowania kaniuli dotętnicznej BD z zaworem do kontroli przepływu i przejść przeszkolenie w tym zakresie.
- W przypadku WSZYSTKICH pacjentów należy stosować standardowe środki ostrożności związane z zapobieganiem zakażeniom.
- Należy bezwzględnie stosować technikę aseptyczną, prawidłowo przygotować skórę oraz prowadzić dalszą ochronę miejsca wprowadzenia kaniuli.
- Należy często sprawdzać miejsce wprowadzenia cewnika.
- Zalecany czas pozostawiania kaniuli dotętnicznej w ciele pacjenta zależy od protokołów/procedur określonych instytucjonalnie lub stosowanych w danym szpitalu. **NIE WOLNO** przekraczać terminu 30 dni.
- Po przesunięciu przełącznika (czerwonego) do przodu droga przepływu płynów zostanie zamknięta. Wyczuwalny jest wyraźny skok. Po przesunięciu przełącznika (czerwonego) wstecz droga przepływu płynów zostanie otwarta.
- Jeżeli do mocowania kaniuli są używane szwy, należy przyszywać wyłącznie oczka skrzydełek.
- Jeżeli przez kaniulę nie jest dokonywany wlew ani nie odbywa się aspiracja, należy zamknąć zawór do kontroli przepływu i założyć na nasadkę odpowiedni koreczek luer.
- Apirogenny. Jałowy. Nie używać, jeżeli opakowanie urządzenia jest otwarte lub uszkodzone.
- Produkt nie zawiera naturalnego lateksu. Nie zawiera PCW. Nie zawiera DEHP.