

Opis produktu

Opatrunki Aqua-Gel są wodną kompozycją naturalnych i syntetycznych polimerów.

Aqua-Gel utrzymuje odpowiedni poziom wilgoci na powierzchni rany, co wspomaga autolityczne oczyszczanie rany oraz pozytywnie wpływa na procesy ziarninowania i epitelializacji. Dzięki właściwościom absorpcyjnym wydzielina wraz z mikroorganizmami zatrzymywana jest w strukturze hydrożelu.

Opatrunek wykazuje dobrą adhezję do rany, lecz bez tendencji do przyklejania się, dlatego zmiana opatrunku jest bezbolesna dla pacjenta.

Aqua-Gel to elastyczny, miękki, plastyczny w formowaniu opatrunek, który może być stosowany na trudnych do zaopatrzenia powierzchniach ciała, tj. dłonie, twarz.

Sposób użycia

Aqua-Gel umieszcza się dowolną stroną na powierzchni rany. Należy stosować opatrunki o wielkości odpowiadającej rozmiarom rany. Opatrunek należy zabezpieczyć przylepcem włókninowym, folią adhezyjną (Vellafilin) lub bandażem Adva-co (kompresjoterapia).

Rozmiar opatrunku	Ilość sztuk w opakowaniu	Refundacja
Ø 5 cm	5	
Ø 6,5 cm	5	
owal 5,5 cm x 11 cm	5	
6 cm x 12 cm	5	
10 cm x 12 cm	5	
12 cm x 12 cm	5	
12 cm x 24 cm	5	
22 cm x 28 cm	5	
Zestaw Pierwsza Pomoc	3	


Cechy

- ✓ Stwarza i utrzymuje w ranie wilgotne środowisko
- ✓ Stanowi barierę dla bakterii z zewnątrz
- ✓ Jest przepuszczalny dla gazów
- ✓ Absorbuje wysięk z rany
- ✓ Posiada działanie kojące
- ✓ Nie przywiera do rany
- ✓ Zmiana opatrunku jest bezbolesna
- ✓ Jest elastyczny, miękki i łatwy w formowaniu
- ✓ Jest często stosowany jako opatrunek wtórny z innymi preparatami

Wskazania

Rany suche, z martwicą, z małą ilością wysięku lub znajdujące się w fazie epitelializacji, w tym:

- ✓ Rany oparzeniowe I i II stopnia
- ✓ Owrzodzenia
- ✓ Powierzchowe odleżyny
- ✓ Miejsca po pobraniu przeszczepów skóry
- ✓ Otarcia
- ✓ Inne rany (stopa cukrzycowa, Epidermolysis Bullosa)

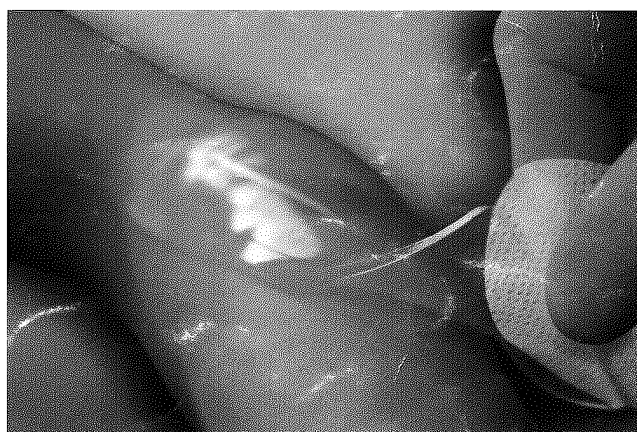

Zaznaczone rozmiary podlegają refundacji w przypadku przewlekłych owrzodzeń a także Epidermolysis Bullosa.

Opatrunki hydrożelowe ratunkowe

Skład opatrunku BurnTec jest identyczny jak opatrunku Aqua-Gel. Ratunkowa wersja opatrunku została opracowana z myślą o zastosowaniu ich w służbach ratownictwa medycznego. W celu umożliwienia szybkiej aplikacji opatrunku został on wzmocniony włókniną poliestrową, która uniemożliwia przypadkowe rozerwanie hydrożelu, natomiast długie marginesy materiału ułatwiają wyjęcie opatrunku z foremki i pewne uchwycenie opatrunku. Ta modernizacja opatrunku znacznie skróciła czas aplikacji opatrunków.

BurnTec jako opatrunek hydrożelowy charakteryzuje się bardzo dobrymi współczynnikami wnikania ciepła, dlatego też opatrunek doskonale odbiera ciepło z miejsca urazu, zapewnia natychmiastowe i długotrwałe chłodzenie co jest niezmiernie istotne podczas niesienia pierwszej pomocy w trakcie oparzeń i innych urazów termicznych.

Sposób użycia

Należy rozerwać torebki ochronne, chwycić opatrunek za margines włókniny i wyjąć opatrunek z foremki. Po aplikacji opatrunki należy zdjąć folie ochronne. W razie konieczności należy opatrunek dodatkowo umocować za pomocą bandaża lub opatrunków przylepnych.

Rozmiar opatrunku	Włóknina w opakowaniu
5 cm x 5 cm	
6 cm x 12 cm	
10 cm x 10 cm	
12 cm x 12 cm	
12 cm x 24 cm	
20 cm x 20 cm	
10 cm x 40 cm	
22 cm x 28 cm	
20 cm x 40 cm	
40 cm x 60 cm	
Na twarz 25 cm x 25 cm	
Na twarz 30 cm x 40 cm	
Na twarz 40 cm x 60 cm	

- ✓ Doskonale chłodzi miejsce urazu
- ✓ Działanie chłodzące koi ból i przynosi ulgę
- ✓ Opatrunek nie przywiera do rany
- ✓ Zdejmowanie opatrunku jest bezbolesne
- ✓ Jest elastyczny, dostosowuje się do kształtu
- ✓ Łatwa i szybka aplikacja w trakcie akcji ratunkowych
- ✓ Dostępne opatrunki o dużych rozmiarach, np. 40x60 cm

Opatrunek stosowany jest podczas pierwszej pomocy, w szczególności w przypadkach takich jak:

- ✓ Oparzenia I i II stopnia (termiczne, chemiczne, elektryczne)
- ✓ Oparzenia słoneczne
- ✓ Otarcia i podrażnienia naskórka
- ✓ Stłuczenia i opuchlizny
- ✓ Inne urazy skóry, w których pożądane jest wilgotne środowisko



Farmactive® Silver Spray

Spray o działaniu hemostatycznym i antybakteryjnym



FARMAC-ZABBAN
BOLOGNA - ITALIA

Opis produktu

Farmactive Silver Spray jest preparatem w postaci aerozolu. Zawiera srebro koloidalne oraz sól sodową kwasu hialuronowego.

Srebro koloidalne posiada właściwości antybakteryjne, dzięki czemu zabezpiecza ranę przed infekcją i przeciwdziała rozwojowi zakażenia nawet w przypadku stosowania tradycyjnych opatrunków z gazy.

Kwas hialuronowy jest polisacharydem, który znajduje się naturalnie w tkance łącznej ludzkiego ciała. Wpływa na utrzymanie odpowiedniego poziomu wilgoci na powierzchni skóry. Podczas procesu gojenia rany nawilżające właściwości kwasu hialuronowego wspomagają fizjologiczne ruchy komórek oraz pobudzają dyfuzję molekuł rozpuszczalnych w wodzie.

Srebro oraz kwas hialuronowy w preparacie zostały wzbogacone o lekki kaolin i dwutlenek krzemu posiadające właściwości absorbcyjne zatrzymujące wysięk w swojej strukturze, co zapewnia odpowiednie środowisko gojenia rany.

Cechy

- ✓ Posiada właściwości antybakteryjne oraz przeciwgrzybicze
- ✓ Zabezpiecza ranę przed kontaminacją, stanowi skuteczną barierę dla drobnoustrojów
- ✓ Wspomaga utrzymanie odpowiedniego poziomu wilgoci na powierzchni rany
- ✓ Dzięki zawartości kaolinu posiada działanie hemostatyczne

Wskazania

Wszelkie rany powikłane :

- ✓ Skaleczenia
- ✓ Otarcia
- ✓ Rany oparzeniowe
- ✓ Odleżyny
- ✓ Owrzodzenia
- ✓ Zespół stopy cukrzycowej

Sposób użycia

Środek przeznaczony do tymczasowego użytku zewnętrznego. Zaleca się stosowanie środka nie dłużej niż przez cztery tygodnie. W przypadku braku postępów w leczeniu, pojawieniu się infekcji lub innych zmian patologicznych należy natychmiast przerwać terapię i skontaktować się z lekarzem. Preparatu nie należy wdychać lub połykać.

Nie stosować na rany zakażone, na powierzchnię błon śluzowych oraz w ich pobliżu (oczy, usta, uszy, genitalia itd.). Unikać ekspozycji na słońce leczonego miejsca tuż po użyciu preparatu w celu uniknięcia podrażnień, co jednak nie ma wpływu na proces gojenia. Nie stosować w przypadku alergii lub nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu. U kobiet w ciąży zaleca się stosowanie pod opieką lekarza.



Produkt	Pojemność	Kod produktu	Ilość sztuk w opakowaniu
Farmactive Silver Spray	125 ml	1701360010	Opakowanie zbiorcze 12 sztuk