

Instrukcja obsługi butelek do płukania oczu **BARIKOS KS oraz Mini-BARIKOS KS**

Butelki do płukania oczu BARIKOS przeznaczone są zgodnie z normą EN 1515-4 do wypłukiwania ciał obcych i substancji szkodliwych w ramach czynności pierwszej pomocy. Przeprowadzenie płukania nie stanowi zastępstwa dla koniecznego badania przez lekarza okulistę.

Butelkę do płukania oczu przechowywać gotową do użycia w odpowiednim miejscu, chronić przed zimnem, promieniowaniem słonecznym i gorącem.

Należy przeszkolić osoby odpowiedzialne za pierwszą pomoc w zakresie użytkowania butelek BARIKOS!

Stosowanie

- usunąć zaślępkę
- pochylić się nad butelką lub trzymać butelkę nad okiem
- rozchylić powieki z pomocą kciuka i palca wskazującego możliwie jak najszerzej
- docisnąć lekko butelkę do oczodołu, naciskając kilkakrotnie ścianki butelki przepłukać otwarte oko!
- w wypadku silnych poparzeń chemicznych płukać do momentu uzyskania pomocy lekarskiej, stosując w wypadku dostępności kolejne butelki!

Przy występującym odruchowym zamykaniu powiek może wystąpić problem z samodzielnym przepłukaniem oka przez poszkodowanego. W tym wypadku zalecane jest wsparcie osoby odpowiedzialnej ze pierwszą pomoc.

Butelki do płukania oczu należy poddawać w regularnych odstępach czasowych kontroli wzrokowej. W trakcie kontroli należy sprawdzać brak naruszeń naklejki plombującej.

Po użyciu butelki należy usunąć pozostałą wodę. Po otwarciu butelki (po naruszeniu naklejki plombującej), również kiedy butelka nie była używana, należy usunąć całość wody.

Termin przydatności do użycia cieczy płuczącej (wody) wynosi 2 lata, o ile butelka pozostaje w stanie zamkniętym i nie została naruszona naklejka plombująca. Termin przydatności do użycia podany jest na butelce.



BARIKOS KS 620 ml nr art. 954004
Mini-BARIKOS KS 175 ml nr art. 954005

norma europejska EN 15154-4

Wyłączny dystrybutor butelek BARIKOS w Polsce:



KROLPOL Król Katarzyna

Tarnówek 58
67-410 Sława, Poland
tel.: +48 76 833 13 29 faks: +48 76 833 19 00
www.krolpol.com.pl

NIP/VAT: 9251006068

Adres korespondencyjny:
KROLPOL Król Katarzyna
ul. Mechaniczna 5 K
67-200 Głogów, Poland

Regon: 080266655